

聯興醫事檢驗所公告

公告編碼：2024-010

日期：113年08月07日

公告事項：

1. 檢驗項目Calcitonin 降血鈣素 變更參考區間。
2. 委外代檢項目Electrophoresis : Hemoglobin,Hb EP血紅素電泳器設備

1. 自2024年8月01日起，檢驗項目Calcitonin 降血鈣素變更委外單位及參考區間：

檢驗項目: Calcitonin 降血鈣素

健保編號: 09115B 降血鈣素

參考區間：Female: ≤ 6.4 pg/mL； Male: ≤ 9.52 pg/mL

分析方法：Electrochemiluminescence immunoassay, ECLIA；e-801，Roche

檢體種類：血清，檢體應避免溶血。

(原參考區間: M: ≤ 18.2 pg/mL； F: ≤ 11.5 pg/mL)

2. 113年08月05日起，委外單位檢驗項目 Electrophoresis : Hemoglobin，Hb EP 血紅素電泳，變更儀器設備，相關內容如下:

健保編號：08030C 血紅素電泳

健保點數：300

自費收費：400

檢體採集：檢體為EDTA全血2-3mL，最低可接受1 mL。不須空腹，在室溫(15至30℃之間)下可保存24小時。放置於2~8℃檢體可以保存七天。

原廠建議 新生兒<28天不適用該機台分析。

檢體退件：檢體不新鮮(放置超過一週)、溶血4+、採檢容器不符、檢體種類不符、檢體量不符。

分析方法：Capillary Electrophoresis，Sebia Capillarys 3 Octa

HPLC，Bio-Rad D10 (Quantitative)

參考區間：Hb A：96.7-97.8%

Hb F： ≤ 0.5 %

Hb A2：2.2-3.2 % (Equivocal zone : 3.3-3.9 %)

(原參考區間：Hb A:95.1-98.0；Hb F：0.0-1.5；Hb A2：2.0-3.4)

Infant HbF (來源:Wong ECC,et al.2009 meeting of ISLH)

0-6 days: 79.4-97.9%	7-14 days: 66.0-98.4%	15-45 days: 49.9-98.4 %	45 days-3M: 10.3-64.6 %
3-6M: 5.2-34.5%	6-9M: 1.1-28.5%	9-15M : 0.2-9.9%	15M-2Y: 0.0-5.5%
2Y-6Y : 0.0-1.6%			

聯興醫事檢驗所
負責人黃柏樺敬上