

聯興醫事檢驗所公告

公告編碼：2024-020

日期：113年12月19日

公告事項：1.檢驗項目 Electrophoresis：Protein， Protein EP， Serum 蛋白電泳分析 更換試劑及參考區間
2.系統性審查， Anti-CCP 抗環瓜氨酸抗體， 變更參考區間之報告格式。

1. 113年12月21日起，委外單位檢驗項目 ELECTROPHORESIS：PROTEIN， PROTEIN EP， SERUM 血清蛋白電泳分析更換試劑及參考區間，說明如下：

檢驗項目：ELECTROPHORESIS：PROTEIN， PROTEIN EP， SERUM

健保代碼：09065B 蛋白電泳分析

檢體採集：血清0.3mL(或全血1.5mL)，不可使用血漿檢體，不須空腹。

保存方式：2~8°C，血清檢體應避免溶血。

檢體退件：溶血4+(會造成alpha2和beta fraction異常偏高)；錯誤的血漿檢體(EDTA、NaF、Citrate)；檢體少於0.3ml；不可使用Plasma(Fibrinogen會在beta和gamma之間出現明顯Band)；解凍完再次冷凍的檢體(避免檢體成份變性)

分析方法：Electrophoresis， SPIFE Touch， Helena

參考區間：

項目	原參考區間	新參考區間
Albumin	54.0-60.3%	47.0-61.6%
Alpha 1	1.8-4.0%	2.0-4.4%
Alpha 2	7.6-10.9%	8.9-14.9%
Beta	11.4-16.1%	10.8-16.2%
Gamma	13.4-20.7%	9.8-24.4%

(2022年版檢驗目錄p.171)

2. 系統性審查， ANTI-CCP 抗環瓜氨酸抗體， 變更參考區間之報告格式， 說明如下：

檢驗項目：Anti-CCP 抗環瓜氨酸抗體

健保代碼：12201B

變更格式：**< 7.0(-)； 7.0-10.0 (+/-)； > 10.0 (+)**

(原2023-013公告 < 7.0)

聯興醫事檢驗所
負責人黃柏樺敬上